

# Virex Detergente Health

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas

- **Ação antimicrobiana comprovada**

**Virex Detergente Health** apresenta ação antimicrobiana comprovada se usado dentro das concentrações indicadas.

- **Eficácia**

**Virex Detergente Health** atente a **RDC N° 14**, de 28 de fevereiro de 2007, classificando-se como desinfetante hospitalar para superfícies fixas.

- **Segurança**

Produto com estabilidade garantida por 6 meses.

- **Praticidade**

- Realiza procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies fixas, não sensíveis ao cloro em uma só operação.

- Diluição automática em equipamentos dosadores **Diversey**.

## Informações técnicas

Características físico-químicas	
Aspecto	Líquido Límpido
Cor	Levemente amarelado
pH (puro)	12,3 a 13,3

## Composição


Hipoclorito de Sódio, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Alcalinizante, Coadjuvante e Água.

## Princípios Ativos

Hipoclorito de Sódio – 1% de Cloro Ativo

## Utilização

**Virex Detergente Health** associa a excelente ação antimicrobiana do Hipoclorito de Sódio com o poder de limpeza do Lauril Éter Sulfato de Sódio. Ideal para ser utilizado em estabelecimentos de saúde na limpeza e desinfecção de superfícies fixas, não sensíveis ao cloro.

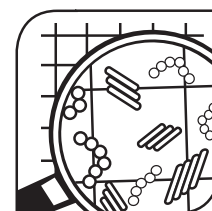

# Virex Detergente Health

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas

## Modo de usar

Prepare uma solução de **Virex Detergente Health** na diluição de 5% (medir 1 litro de produto transferir para um recipiente adequado e completar o volume com água até 20 litros, ou então utilizar o dosador **Diversey** recomendado). Aplique a solução nas superfícies não sensíveis ao cloro a serem higienizadas, espere 10 minutos para que o produto exerça sua ação antimicrobiana, enxágüe com água potável. No caso de superfícies muito sujas, repita a operação.

## Embalagem

Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno de 5 litros cada.

## Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, longe de produtos ácidos e em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Deve ainda ser armazenado afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis. Vide Ficha de Segurança do Produto. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

## Precauções de uso

**PERIGO! Causa danos se ingerido. CORROSIVO! Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com ácidos, este produto libera calor e gases. Não misturar com produtos a base de amoníaco.** Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, use luvas, avental, botas, máscara e óculos de segurança. Não beba, coma ou fume durante a aplicação. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Em caso de contato com a pele, remova as roupas contaminadas e lave as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômitos e consulte o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em todos os casos, procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem ou o rótulo do produto. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0\_\_11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Nunca reutilize as embalagens vazias.

**Produto registrado no Ministério da Saúde sob o nº 3.2661.0203**

---

### Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125

Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de

Atendimento ao Cliente

Ligação gratuita: 0800-134166

e-mail: [sac.br@sealedair.com](mailto:sac.br@sealedair.com)

FAX: (0\_\_11) 5687-7538 ou 5687-7524

[www.diverseym.com](http://www.diverseym.com)